



Bruksanvisning snabbtest urin

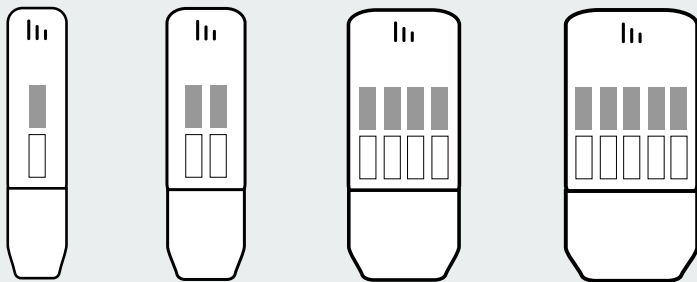

Version 1.04
Reviderad 20240528

Teststickor

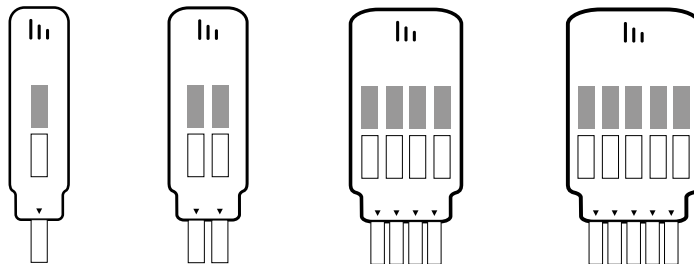

NÄR SKA MAN UTFÖRA TESTET?

Du kan utföra testet när som helst på dygnet.

Det är även rekommenderat att du samlar upp urinen i en ren & torr behållare.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Använd inte efter utgångsdatum.
(Se bäst före datum på förpackningen).
2. Testpanelen ska förbli förseglade tills den används.
3. Använd ej testmaterialet om påsen är skadad eller öppnad.
4. Rör ej ytskiktet på teststaven.
5. Återanvänd aldrig testmaterialet. Släng efter användning.

Utför testet


1

Ta ut testpanelen ur folie påsen.



2

Håll panelen med ena handen och dra av den skyddande hylsan för att exponera uppsugningsdelen.

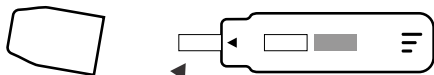


Uppsugningsdelen

3

Samla urin i en ren och torr behållare som du direkt doppar teststavens uppsugnings remsa eller remsor vertikalt i. Ta upp testet efter minst 10-15 sekunder.

OBS! Se till att urinet inte passerar över pilen.

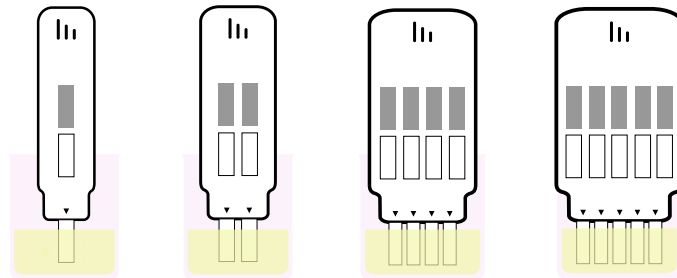

10-15 sek. 

4

Lägg kortet på en jämn torr yta. Starta timer och avläs resultatet inom 5 minuter. **OBS!** Läs inte av testet efter mer än 10 minuter.

5 min. 

Kontrollstreck →

Teststreck →



Positivt



Negativt



Ogiltig



Tolka resultatet

Negativ * Två linjer framträder.

En röd linje bör vara i kontrollregionen (C), och en till intilliggande uppenbart röd eller rosa linje bör vara i testregionen (T).

Detta negativa resultat indikerar att drogkoncentrationen är under-detekterbar nivå.

*ANMÄRKNING: Nyansen av röd färg i

testregionen (T) kan variera, men testet bör anses vara negativt om det ens är en svag rosa linje.

Positiv.

En röd linje framträder i kontrollregionen (C).

Ingen linje framträder i testregionen (T). Detta positiva resultat indikerar att drogkoncentrationen är över detekterbar nivå.

Ogiltig.

Kontrolllinjen framträder inte. Otillräcklig provvolym eller felaktigt utförande är de mest troliga anledningarna då kontrolllinjen inte framträder. Granska proceduren och upprepa testet med en ny testremsa. Om problemet kvarstår, avbryt proceduren och kontakta din lokala leverantör.